


骨盤臓器脱の症状・フェミクッション使用ポイント


【骨盤臓器脱という疾患】

海外では、成人女性の3人に1人とも云われており、日本でも相当数の患者がいると推測されています。別名「性器脱」「膣脱」とも云われ、骨盤内の子宮、膀胱、尿道、小腸、直腸などの臓器を支えている骨盤底筋群（骨盤底を構成している筋肉や靭帯など）が弱くなり、それらの臓器が下垂または脱出てくる病気です。膣内に留まっているうちは気づきにくい病気ですが、気づかずに重症化してしまうと外陰の外まで脱出してしまうために臓器の表面が乾燥してしまい、下着や皮膚と擦れて痛みを生じ、歩行困難になる事や、排尿・排便が困難になるなど、日常生活に支障をきたし、生活の質(QOL)を著しく妨げます。


【症状一例と重症度】	【フェミクッション使用ポイント】
臓器が出てくる時間は、患者様によって違います。 (起床してすぐ・午前中・午後・夕方から等)	必ず、臓器が出てくる前に装着してください。 ※クッションで膣口を塞ぎ、サポーターで押し上げ固定します。
殆どの場合、就寝時に臓器は膣内に戻ります。	就寝時など、 臓器が戻っている際 にはご使用頂く必要はありません。
臓器が出てくる度合いにより重症度が表されます。 ステージ1(膣内)～ステージ4(膣外へ完全脱出)	スターキットにはS/M/L各サイズのクッションが入っています。 重症度に関わらず、クッションはSサイズからのご使用をお勧めします。

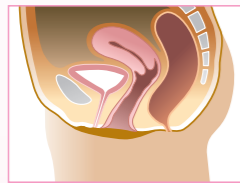

正常

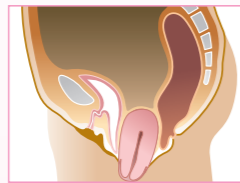

子宮脱

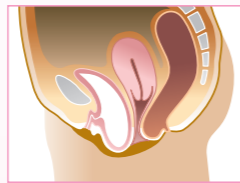

膀胱瘤



直腸瘤

患者様からの声

子宮脱になり、手術しかない、と言われていました。今回、クリニックの先生から進められて購入しました。リングも合わず、日常の不快感に悩まされていましたが、フェミクッションを使用してから、脱の程度が少し減ったと感じています。特に入浴時に不快でしたが、使用してからは着替え時に、ほとんど出てこなくなったので助かります。また、フェミクッションは、リングと異なり、膣の内部に入れることが無いので、使用が楽です。【東京都在住/年齢不明】

以前は痛みのため、家でじっと座っているだけでしたが、フェミクッションを使うと散歩に行ったり、買い物にも行けるようになりました。【神奈川県在住/年齢不明】

お腹に力がかかり、家事をするのも億劫でしたが、普通にこなせるようになりました。【東京都在住/年齢不明】

おかげ様にて、只今はやわらぎました。ももとの状態になります様、念じ乍ら、一日一日を送っています。【京都府在住/72歳】

膀胱瘤と診断されています。痛みなどのため辛くので、どうしても手術をしたかったのですが、持病のため断られてしまいました。排尿困難もありとにかく不快な毎日でしたが、そんな時医師から紹介され、フェミクッションを知りました。使い始めてからは、お手洗いで気持ち良いくらいシャーっと出るようになりました。私は一生フェミクッションを使って生活するつもりです。【神奈川県在住/68歳】

フェミクッションを着けて1日グッと固定すると、次の日は出てきませんでした。3日間出てこないときもあります。【神奈川県在住/63歳】

私は毎日23回前後お手洗いにいき、夜中も何回も目が覚めたのですが、フェミクッションを使用してから、10～13回くらいで済むようになりました。お陰様で夜もそんなに起きなくていいので助かっています。【鳥根県在住/74歳】

以前は、他人にはわからない状態で悩み、落ちこんで、どうしたらいいかわからない状態でした。体から飛び出してくる物を、指で押し込んだり、押さたりしながら、普通に歩くのもつらい生活だったのが、今ではフェミクッションをしているおかげで安心感があり、立つのも座るのも歩くのも、不安なく日常生活を送っています。いたずらをして逃げる子供をバツつかまえることもできます！フェミクッションは寝る時だけはずし、起きたらずっとつけています。現在の症状は、骨盤底筋体操をして、フェミクッションで常に押し込んだ状態になっているおかげか、はずしても以前出っかけていたものが少し元に戻り、違和感がなくなっています。大きくなるようですが、半年前のことを思うとまるで夢のようです。(途中省略) 今ではフェミクッションなしの生活は考えられません。【北海道在住/43歳】

フェミクッションは医療費控除が受けられます。

製造販売元  株式会社 女性医療研究所®
www.urogyne.jp

〒170-0003 東京都豊島区駒込1-31-10 1F

TEL:03-5319-2676

FAX:03-5319-2677

骨盤臓器脱の新しい医療機器

(性器脱=子宮脱・膀胱瘤・直腸瘤・小腸瘤・尿道瘤など)

フェミクッション®

NEW 体に優しい履くスタイルの新しい治療方法です。
フェミクッションの装着により通常の日常生活を送っていただけます。

このような方に最適です

- リングペッサリーが適さない方
- リングペッサリーを希望されない方
- 手術待ちのためにリングペッサリーを外す方
- 持病などで手術が受けられない方
- 手術を希望されない方
- なかなか通院できない方



特許取得

フェミクッションのコンセプト

- 独自で開発した3つの構成品
- 身体に負担をかけないよう配慮されています
- 下着感覚の履くスタイルの医療機器
- 症状にあわせてご自身で使えます
- 衛生用品のように扱えます
- 洗って繰り返し使えます